

Manuel Utilisateur

906ELG

**Accélérateur
électronique avec
contrôle de
radiofréquence**



Guidosimplex

Rev.0

www.guidosimplex.it

Cher client,

Merci pour avoir acquis un dispositif Guidosimplex.

Comme tous nos produits, ce dispositif a été étudié et réalisé selon les standards de qualité plus élevés dans le respect absolu des normes de sécurité en vigueur.

Les produits Guidosimplex, construits avec les meilleurs matériaux disponibles et soumis à des tests continus, offrent une grande fiabilité et ne nécessitent pas d'une manutention particulière.

En outre, comme nous faisons depuis toujours, nous opérons la plus grande attention à ne pas modifier en aucune façon les caractéristiques intrinsèque et le design de la voiture qui peut être, dans n'importe quel moment, ramenée dans sa configuration originale.


Ce produit Guidosimplex est capable de satisfaire toutes les exigences connectées à sa destination pourvu que soit respectée la modalité de son utilisation correcte

Nous vous conseillons donc de prendre vision du présent manuel avant encore d'utiliser le produit.




INTRODUCTION

Le nouveau dispositif **906ELG** est un système d'accélération manuel innovant avec fonctionnement sans fil. Cette fonction vous permet de gérer l'accélération sans lâcher les mains du volant. Une fois portée, la **906ELG** ne fait plus qu'un avec la main et s'adapte facilement grâce à ses réglages. Ce dispositif est le résultat d'une étude dédiée au développement d'un accélérateur différent des standards actuellement utilisés et capable de satisfaire les clients les plus exigeants. Fabriqué en utilisant les techniques de construction les plus avancées, il montre non seulement un fonctionnement optimal, mais aussi un look résolument captivant. La fonctionnalité et l'esthétique ont toujours été un point de l'italianité de Guidosimplex.

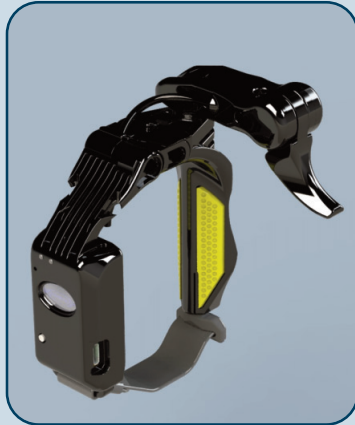

ACTIVATION DU DISPOSITIF

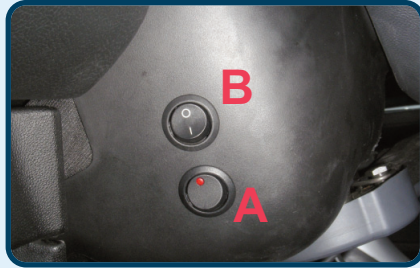

Dans l'habitacle de la voiture, deux interrupteurs sont installés dans une position facilement accessible par l'utilisateur. **(A)** Interrupteur **MARCHE / ARRÊT** Cet interrupteur peut être utilisé pour activer et désactiver le dispositif d'accélération. **(B)** Le déplacement de cet interrupteur en position 1 active le mode 50% rendant la commande d'accélération moins sensible, optimisant ainsi les performances continues et les variations d'accélération telles que les manœuvres de circulation et de stationnement.


ACTIVATION

1) Demarre le moteur

2) Activez l'appareil en plaçant l'interrupteur **(A)** en position marche (LED rouge allumée) Dans cette configuration, pour des raisons de sécurité, la pédale d'accélérateur d'origine et l'accélérateur Guidosimplex seront inopérants.

ACTIVATION DU DISPOSITIF

- !** 3) Si la commande d'accélérateur sans fil a été désactivée par le bouton d'activation (C), le bouton doit être enfoncé puis relâché.

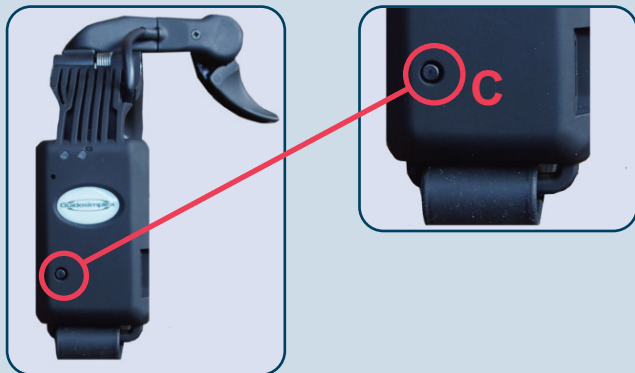

- 4) Poussez le levier de frein vers l'avant (action de freinage) à partir de ce moment, l'accélérateur Guidosimplex est opérationnel alors que la pédale d'accélérateur d'origine est désactivée.

- !** Si pendant l'utilisation du dispositif d'accélération manuelle la pédale d'accélérateur d'origine est accidentellement enfoncée, cette manœuvre n'aura aucun effet car la pédale d'origine n'est pas active lors de l'utilisation de l'accélérateur Guidosimplex et vice versa.

- !** Pour utiliser la voiture avec la pédale d'origine, il est nécessaire de désactiver l'appareil Guidosimplex avec l'interrupteur (A LED rouge éteinte).

CHARGER L'APPAREIL



MODULE ÉMETTEUR




PRISE DE CHARGE



CÂBLE USB TYPE C

Lorsque le niveau de la batterie tombe à 5% La LED rouge commence à clignoter pour indiquer qu'il est nécessaire de recharger. La batterie à l'intérieur de l'émetteur, étant au lithium, ne doit pas être utilisée tant que la charge n'est pas complètement épuisée. Par conséquent, lorsque la LED rouge clignotante s'allume, il est préférable de la recharger rapidement. Si l'émetteur n'est pas actif, la LED rouge sera éteinte pendant la charge. Si vous souhaitez vérifier l'état de charge, vous devez activer l'émetteur, la LED rouge s'allumera et restera allumée pendant toute la période de charge. Lorsque la charge est terminée, la LED jaune fixe s'allume en même temps que la LED rouge (charge terminée). La recharge complète prend environ 4 heures

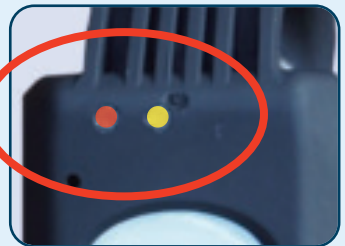


NOTES GÉNÉRALES



Lorsque l'appareil 906ELG est actif, la LED jaune clignote lentement pendant quelques cycles puis s'éteint. Il est alors possible de vérifier l'état de l'émetteur en maintenant le bouton d'activation enfoncé, la LED jaune commencera à clignoter rapidement indiquant que l'émetteur est actif, en relâchant le bouton la LED jaune s'éteindra automatiquement. La LED jaune clignotant avec une cadence d'environ 5 secondes indique que l'émetteur est actif en attendant que le récepteur soit activé (le récepteur est activé automatiquement à la mise sous tension de l'interface).

NOTES GÉNÉRALES

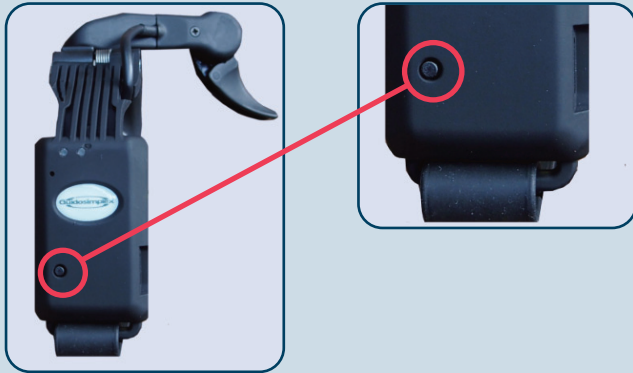

Bouton d'activation et de désactivation de l'émetteur. Si l'émetteur est actif, vous pouvez l'éteindre en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce que les LED jaune et rouge s'allument. En relâchant le bouton, l'émetteur s'éteint. Après cette opération, si vous souhaitez utiliser à nouveau l'émetteur, appuyez et relâchez le bouton, l'émetteur sera à nouveau actif. Il est recommandé d'effectuer cette opération lorsque la voiture n'est pas utilisée pendant de longues périodes.

UTILISATION DE L'APPAREIL



Insérez votre main à l'intérieur de l'accélérateur manuel.



Placez la commande sur le paume de la main



Ajuster, à l'aide de la sangle adhérence à la paume de la main

UTILISATION DE L'APPAREIL



En activant la gâchette, on obtient une accélération

En cas d'anomalie ou de mal fonctionnement du dispositif, nous vous invitons à vous rendre auprès d'un centre autorisé Guidosimplex.

Vous pouvez trouver le centre d'assistance plus voisin en consultant le site internet

www.guidosimplex.it

Ce manuel de l'utilisateur est publié par Guidosimplex srl et ne comporte en lui-même aucune garantie.

Guidosimplex srl se réserve le droit d'apporter en n'importe quel moment et sans préavis, éventuelles modifications et améliorations à ce manuel du aux ajournements des dispositifs et/ou des programmes.

Tout droits réservés © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it
www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO